

## Narhinel Confort Recambios 15 + 5



Recambios desechables de material suave y flexible para usar con el aspirador Narhinel Confort .

Calificación: Sin calificación

**Precio**

8,50 €

7,60 €

1,32 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Modo de empleo:

Colocar el recambio en el cuerpo central del aparato Colocar el extremo del recambio justo a la entrada de uno de los orificios nasales del bebé Aspirar suavemente, poco a poco, de forma regular, por la boquilla de aspiración Volver a repetir la operación en el otro orificio nasal Quitar el recambio sucio y desecharlo.

**SE RECOMIENDA USAR RHINOMER 1 33%**

**TAMBIEN EXISTE EL RHINOMER BABY**

Narhinel Confort son recambios desechables de material suave y flexible que utilizados con el aspirador Narhinel Confort Rhinomer Baby son muy higiénicos y facilitan la eliminación de las mucosidades previniendo así las complicaciones como otitis, bronquitis, etc., muy frecuentes en los bebés. Su filtro absorbente hace que aspirar sea muy fácil, seguro e higiénico para la delicada nariz del bebé. Cada recambio, envasado de forma individual, contiene un filtro absorbente que garantiza una máxima higiene ya que retiene las mucosidades. Los recambios están diseñados para adaptarse perfectamente a la nariz del bebé e incluyen un filtro absorbente para detener las mucosidades. De esta forma se mantiene la higiene del respirado. Después de usarlo, el recambio debe ser desechado para evitar posibles contaminaciones posteriores.

Modo de Empleo:

El método Rhinomer consta de 2 sencillos pasos para despejar las fosas nasales del bebé y ayudar a restablecer su respiración:

-Paso 1: Limpieza nasal con Rhinomer Baby Fuerza extra suave.

-Paso 2: Aspiración nasal con Narhinel Confort Aspirador Nasal.

Con Narhinel Confort debe seguir los siguientes pasos:

1. Colocar un recambio en el cuerpo central del aparato.
2. Colocar la boquilla de aspiración en tu boca y el extremo del recambio justo en la entrada de uno de los orificios nasales del bebé.
3. Aspirar suavemente, poco a poco y de forma regular, por la boquilla de aspiración.
4. Si el recambio se llena entre la aspiración de los dos orificios, retirar las secreciones nasales sobre un pañuelo soplando por la boquillas de aspiración o utilice un nuevo recambio.
5. Repetir la operación en el otro orificio nasal don el mismo recambio.
6. Quitar el recambio sucio y desecharlo.

#### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.